

Standardy rozmieszczania elektrod dla systemu holterowskiego **CARDIOSCAN**


Rejestrator 3- lub 12-kanalowy

Model: DMS300-4A



Standard

**Kolorystyczne oznaczenia
odprowadzeń kabla**

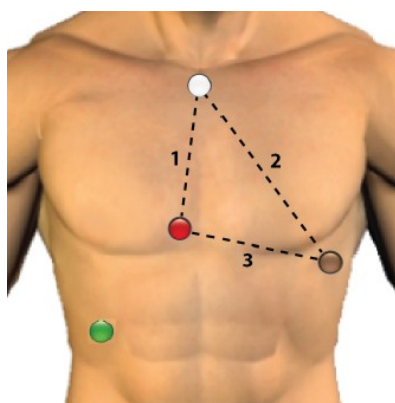


4 odprowadzenia

3 kanały EKG

Kan. 1: V1
Kan. 2: V5
Kan. 3: I


**Kolorystyczne oznaczenia
odprowadzeń kabla**

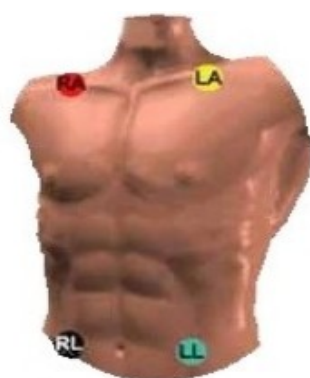

4 odprowadzenia

3 kanały EKG

Standard E

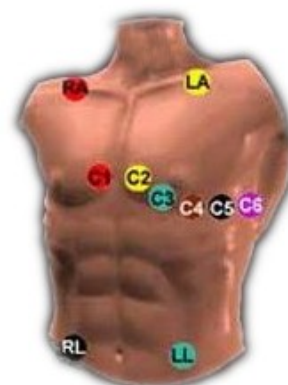

10 odprowadzeń

12 kanałów EKG

**I, II, III, aVR, aVL, aVF,
V1, V2, V3, V4, V5, V6**

Zaleca się wymianę kabli na nowe co 6 miesięcy.