

Standardy rozmieszczania elektrod dla systemu holterowskiego **CARDIOSCAN**


Rejestrator 3- lub 12-kanalowy

Model: DMS300-4L




3 kanały EKG

5 odprowadzeń

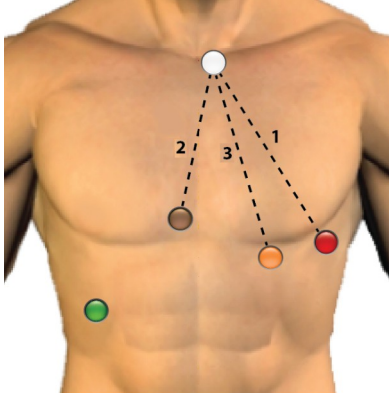


Kan. 1: V5
Kan. 2: V1
Kan. 3: V3

7 odprowadzeń

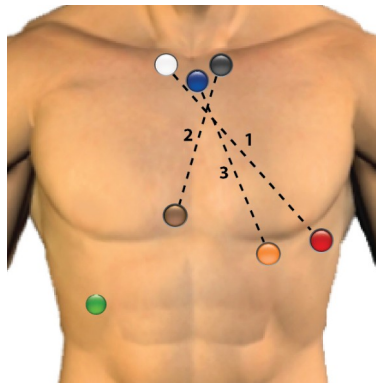


Kan. 1: V5
Kan. 2: V1
Kan. 3: V3

4 odprowadzenia

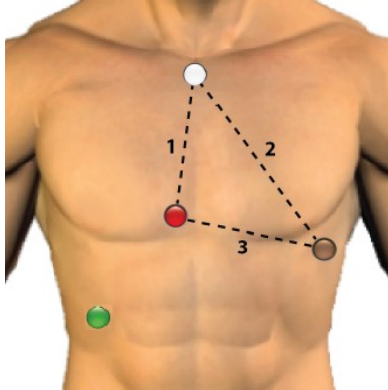


Kan. 1: V1
Kan. 2: V5
Kan. 3: I

4 odprowadzenia

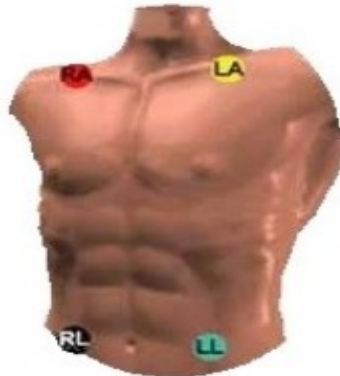

12 kanałów EKG

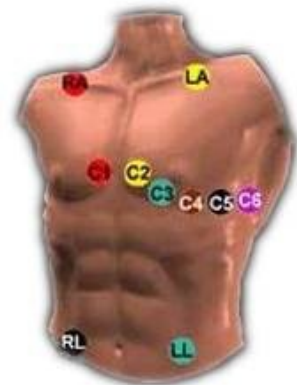

10 odprowadzeń

**I, II, III, aVR, aVL, aVF,
V1, V2, V3, V4, V5, V6**

Zaleca się wymianę kabli na nowe co 6 miesięcy.